

zetClean®

Wiper Bowl® Safe & Clean

für Multitex® Wipes



Wischen statt Sprühen

mit Feuchttüchern aus dem Wiper Bowl® Safe & Clean Spendersystem

- Senkung des Desinfektionsmittelverbrauchs – die Anwendungslösung ist bis zu 4 Wochen (28 Tage) bzw. 6 Wochen (42 Tage) verwendbar
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgaben bestätigt
- hoher Hygienestandard bei der täglichen Desinfektion und Reinigung
- **Multitex® Wipes** bestehen aus **100 % PET*** – so wird die Wirkstoffkonzentration der Desinfektionsmittel nahezu vollständig abgegeben
- befüllbar mit den Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen Ihrer Wahl
- einfache Entnahme der Einmaltücher durch Abriss-Perforation – so sind 60/100/110 Desinfektionsvorgänge möglich; durch den transparenten Deckel hat man die Füllmenge immer im Blick
- wirksamer Schutz vor Austrocknung durch wiederverschließbaren Deckel mit Verschlusskappe
- alle relevanten Inhaltsinformationen sicher im Blick durch beschriftbares Chargenetikett

*PET hat ein geringes Adsorptionsverhalten der QAV (Quartäre Ammonium-Verbindungen) an den Fasern.



NEU: JETZT MIT TRANSPARENTEM DECKEL FÜR BESSERE KONTROLLE DES INHALTES



zetZubehör Reinigungszubehör/Matten
zetMatic Spendersysteme
zetMedica Pflegebedarf
zetClean Reinigungs- und Pflegemittel
zetGigant Toilettenhygiene
zetRoll Handdrehrollensysteme
zetForm Falldübel-Systeme
zetSorb Ölsaugtücher
zetPutz Putztücher/Putzrollen
zetMask Einweg-Atemschutzmasken
zetDress Einweg-Schutzkleidung

Aufklappen, rausziehen, anwenden: Auf diesen Baukasten können Sie bauen.

Wiper Bowl® Safe & Clean ist die ökonomische und hygienische, wiederbefüllbare „Baukastenlösung“ zur gründlichen Wischdesinfektion und Reinigung sensibler Bereiche wie z. B. in Alten- und Pflegeheimen.

Vliestuchrolle, weiß, 100% PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselfrei und einzelverpackt

■ Multitex® Wipes Standard, fein gelocht

VE = 6 Rollen
110 Abrisse à ca. 24 x 32 cm · Art.-Nr. 11829-24
100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11839-00

■ Multitex® Wipes Premium, glatt

VE = 8 Rollen
60 Abrisse à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11830-02
 VE = 6 Rollen
100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm · Art.-Nr. 11840-00
110 Abrisse à ca. 24 x 32 cm · Art.-Nr. 11843-00
100 Abrisse à ca. 18 x 38 cm · Art.-Nr. 11842-00

■ Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer

aus Kunststoff, wiederverschließ- und -verwendbar,
 VE = 1 Eimer
eckig, passend für Art. 11829-24, 11830-02, 11839-00,
 11840-00, 11843-00, Höhe ca. 20 cm · Art.-Nr. 60995-00
rund, passend für Art. 11829-24, 11830-02, 11839-00,
 11840-00, 11842-00, 11843-00, Höhe ca. 21 cm,
 ca. 21 cm Ø · Art.-Nr. 60997-00

■ Wandhalterung mit Schloss

für Spendereimer Art.-Nr. 60997-00 · Art.-Nr. 60092-01
 für Spendereimer Art.-Nr. 60995-00 · Art.-Nr. 60087-00

**BITTE BEACHTEN SIE
AUCH UNSER EINMAL-
TUCHSPENDERSYSTEM!**



Einfache Vorbereitung – sichere Anwendung

Tränken Sie die Tuchrolle im Eimer mit Ihren bewährten Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen und kennzeichnen das Etikett entsprechend. Dann verschließen Sie den Deckel und lassen die Flüssigkeit von den Tüchern aufsaugen. Bereits nach einigen Minuten Wartezeit ist Ihr **Wiper Bowl®** Spendersystem einsatzbereit.

Durch **das praktische Chargenetikett** haben Sie alle relevanten Inhaltsinformationen während der gesamten Einsatzzeit sicher im Blick. Danach lässt es sich rückstandsfrei entfernen.

Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer sind mit den entsprechenden Informationen zur Arbeitsanweisungen sowie Piktogrammen bedruckt und können im RDG thermisch aufbereitet werden.

ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Zentrale
 Urbacher Straße 4+5
 D-53842 Troisdorf
 Tel.: +49 (0)2241 484-0
 Fax: +49 (0)2241 484-29
info@zvg-troisdorf.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
 Gröninger Weg 7
 D-74379 Ingersheim
 Tel.: +49 (0)7142 9123-0
 Fax: +49 (0)7142 779131
info@zvg-gmbh.de
www.zvg-troisdorf.de

ZVG
Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH
 Gewerbering Nord 24
 D-01900 Großröhrsdorf/OT Bretnig
 Tel.: +49 (0)35955 831-0
 Fax: +49 (0)35955 447-17
info@zvg-sachsen-gmbh.de
www.zvg-sachsen-gmbh.de